

## Gebrauchsanweisung für Praxisliege „Standard“, „Kopfteil 80cm“

Artikel-Nr. 120.6., 120.8..

Artikel-Nr. 123.6., 123.8..

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein *panno-med* Produkt entschieden haben. Bei der Entwicklung und Produktion unserer Liegen legen wir besonderen Wert auf Sicherheit und Bedienungskomfort. Der hohe Qualitätsstandard von *panno-med* Liegen garantiert eine lange Lebensdauer.

### **Technische Beschreibung:**

Abmessungen der Liege (gesamt): 1950 x 650 mm (L x B) bzw. 1950 x 800mm (L x B)  
Abmessungen des Kopfteiles: 500 x 650 mm (L x B) bzw. 500 x 800 mm (L x B)

Sichere Arbeitslast: 150 kg  
Verstellwinkel des Kopfteiles: + 22°

### **Bedienung:**

Die Verstellung des Kopfteiles erfolgt manuell. Der jeweilige Neigungswinkel wird durch eine zweifache Rastermechanik gehalten.

### **Reinigung:**

Mittels leicht angefeuchtetem Tuch und mildem Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.

### **Reparatur:**

Reparaturarbeiten dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Personen durchgeführt werden.

